



Instructions for Use SaniQ



Inhaltsverzeichnis

1.	SaniQ Gebrauchsanweisung	3
2.	Zweckbestimmung	3
3.	Funktionsweise	3
4.	Nutzungsvoraussetzung	4
5.	Anwendungsgebiet	5
6.	Wann soll SaniQ nicht angewendet werden (Gegenanzeigen)?	5
7.	Anwendungshäufigkeit	5
8.	Mindestalter	5
9.	Sicherheitshinweise und Nebenwirkungen	6
10.	Angaben für Notfälle	6
11.	Hersteller	7
12.	Stand der Software	7
13.	Stand der Information	8
14.	Weitere Informationen	8

1. SaniQ Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung dient der korrekten Anwendung von SaniQ. Bitte lesen Sie sich diese Informationen genau durch und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen. Des Weiteren steht Ihnen das SaniQ Support-Team unter support@qurasoft.de zu den üblichen Geschäftszeiten für Anfragen zur Verfügung.

2. Zweckbestimmung

Die SaniQ App unterstützt Herz- und Lungenerkrankte bei dem Management des Gesundheitszustands. Auf diese Weise sollen Erkrankte eine bessere Übersicht, Überwachung und Einstellung der Medikamente erhalten. Darüber hinaus unterstützt SaniQ die Dokumentation von relevanten Vitalwerten, um eine optimale Behandlung zu gewährleisten.

Die SaniQ App ist zur eigenständigen Nutzung in Ergänzung zur üblichen Versorgung von Herz- und Lungenerkrankten bestimmt, die mindestens 12 Jahre alt sind.

SaniQ ist weder dafür bestimmt, Behandlungen durch einen Leistungserbringer im Gesundheitswesen zu ersetzen noch dafür bestimmt, Informationen für diagnostische Entscheidungen zu liefern.

3. Funktionsweise

SaniQ ist eine innovative Smartphone App zur eigenständigen Anwendung durch Erkrankte mit Herz- und/oder Lungenkrankheiten, welche sich nach einer Vereinfachung des Alltags sehnen. Mit Hilfe der App können digitale Gesundheitstagebücher erstellt werden, sodass unterschiedliche Vitalwerte erfasst und dokumentiert werden können. Darüber hinaus ist der Anwender in der Lage, mit Hilfe von Bluetooth-Messgeräten, die Messwerte automatisch zu übertragen und sowohl den Medikamentenplan als auch Erinnerungen für diesen zu erstellen. Durch den Gesundheitsordner sind abgelegte Labor-, Blut- und Untersuchungsbefunde jederzeit griffbereit.

Nutzen Ärzt:innen das Praxisportal SaniQ Praxis, können bei Auffälligkeiten über die Chatfunktion oder die Videosprechstunden, Kontakt zu diesen aufgenommen werden.

Sie benötigen für die Registrierung einen einmaligen Zugangsschlüssel.

Sollten Sie Fragen zu der Gültigkeitsdauer Ihres Zugangsschlüssels von SaniQ haben, können Sie unser SaniQ Support-Team, unter support@qurasoft.de anschreiben. Nach der Registrierung ist SaniQ passwortgeschützt jederzeit für Sie verfügbar. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung.

4. Nutzungsvoraussetzung

Um sich in der SaniQ App zu registrieren, benötigen Sie ein Smartphone mit einem Internetzugang und einen gültigen Zugangscode. Damit sich die gemessenen Vitalwerte auch in die App übertragen lassen, müssen Sie Bluetooth aktivieren.

Darüber hinaus benötigen Sie als technische Mindestvoraussetzung bei iOS das Betriebssystem 15, für Android die Version 8.

Um SaniQ Praxis nutzen zu können benötigen Sie einen Computer, einen Laptop oder ein Tablet mit einem Internetzugang. Zudem benötigen Sie eine aktuelle Browser-Version von Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge oder Safari.

Da SaniQ Praxis Sie in einem dynamischen Dialog durch das Programm führt, sind keine speziellen Computerkenntnisse erforderlich.



5. Anwendungsgebiet

Die SaniQ App dient der Unterstützung von Menschen, die an chronischen Erkrankungen oder an einem Infekt leiden. Sie sollen, während der akuten/chronischen Krankheitsphase beziehungsweise in der Nachsorge, unterstützt werden.

SaniQ Praxis hingegen richtet sich an Ärzt:innen, welche die Vitalwerte von ihren Patienten digital und jederzeit abrufbar beobachten möchten.

6. Wann soll SaniQ nicht angewendet werden (Gegenanzeigen)?

Es liegen keine Gegenanzeigen vor.


7. Anwendungshäufigkeit

Erfahrungen zeigen, dass die SaniQ App idealerweise mit in den Alltag integriert werden soll.

8. Mindestalter

Die App darf ausschließlich von Personen verwendet werden, die mindestens 12 Jahre alt sind.

9. Sicherheitshinweise und Nebenwirkungen

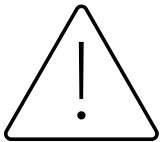

SaniQ ersetzt keine Ärzt:innen. Eine Änderung bestehender Medikationen und/oder Behandlungen darf nicht ohne Rücksprache mit den behandelnden Ärzt:innen erfolgen. Sie sollten Ihre Ärzt:innen kontaktieren, wenn sich Ihr Befinden oder Ihre Stimmung längere Zeit (über mehrere Tage oder Wochen) nicht bessern oder sich akut verschlechtern sollten.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem Sie niedergelassen sind, zu melden. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Impressum von SaniQ unter dem Menüpunkt „Kontakt“ oder auf der Homepage von SaniQ.


10. Angaben für Notfälle

SaniQ ist nicht für den Einsatz in Notfällen geeignet. Bei Notfällen (z.B. Krisen, Verschlechterung Ihres Gesundheitszustandes) kontaktieren Sie umgehend Ihre Ärzt:in oder wählen Sie bitte eine für Ihr Land geltende Notfallnummer von Feuerwehr oder Polizei. Hier einige Beispiele: Deutschland:

- Notruf allgemein: 112
- Notruf Rettungsdienst: 112
- Polizei: 110
- Seelsorge: 0800 111 0 111, 0800 111 0 222

Falls Sie unter den angegebenen Telefonnummern niemanden erreichen oder keine Hilfe erfahren, prüfen Sie bitte, ob sich die Telefonnummern geändert haben könnten.

11. Hersteller

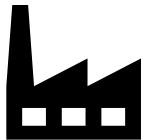

Qurasoft GmbH
Universitätsstraße 3
56070 Koblenz
Deutschland
www.qurasoft.de

12. Stand der Software

Um zu sehen, ob Sie die aktuelle Software-Version installiert haben, können Sie dies bei einem iOS Betriebssystem im App Store nachschauen. Öffnen Sie dafür den App Store und tippen Sie oben im Bildschirm auf Ihr Profilsymbol. Scrollen Sie herunter, bis Sie die SaniQ App gefunden haben, um ausstehende Updates und Versionshinweise anzeigen zu lassen. Sofern eine aktuellere Version vorhanden ist, wird Ihnen der Button „AKTUALISIEREN“ angezeigt. Drücken Sie diesen, um ein Update durchzuführen. Wenn Sie sehen möchten, welche Version der App Sie installiert haben, tippen Sie ein weiteres Mal auf die App SaniQ. Aus der Beschreibung entnehmen Sie dann die Information, um welche Version es sich handelt. Alternativ können Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones herunterscrollen, bis Sie die App SaniQ gefunden haben. Drücken Sie auf das Feld und Ihnen wird in der Beschreibung angezeigt, welche Version Sie installiert haben.

Sie können überprüfen, ob auf Ihrem Android-Betriebssystem die aktuelle Softwareversion installiert ist, indem Sie den Play Store öffnen und in der Suchleiste nach „SaniQ“ suchen. Wenn Sie die Schaltfläche "Öffnen" sehen, haben Sie bereits die neueste Version heruntergeladen. Wenn Sie jedoch „Aktualisieren“ sehen, müssen Sie diese Schaltfläche drücken und die neueste Version wird heruntergeladen.



Um herauszufinden, welche Version Sie installiert haben, können Sie in der App im Bereich „Mehr“ unter Softwarelizenzen nachsehen. Alternativ entnehmen Sie diese Information in den „Einstellungen“ Ihres Smartphones. Unter „Apps“ suchen Sie nach der SaniQ App und scrollen herunter, um „Version“ sehen zu können.

13. Stand der Information


2022-09-12

14. Weitere Informationen


Bei technischen Fragen können Sie sich per E-Mail an das SaniQ Support-Team support@qurasoft.de wenden. Wenn Sie diese Gebrauchsanweisung kostenlos in gedruckter Fassung erhalten möchten, senden Sie bitte eine Anfrage an die oben genannte Support E-Mail-Adresse. Wir senden Ihnen die gedruckte Fassung innerhalb von sieben Werktagen zu.

MD

Symbolerklärungen

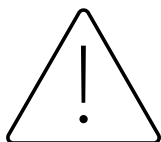


Vorsicht

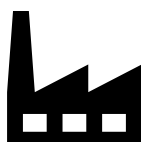

Hersteller



Medizinprodukt

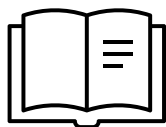

Elektronische Gebrauchsanweisung lesen